



Babydoppler Connect

A062201

Návod na použitie

Vhodné prostredie:


teplota -10°C do + 55°C / vlhkosť <93% / atmosférický tlak 50kPa až 106kPa

Ďakujeme, že ste si vybrali Babymoov Babydoppler Connect.
DÔLEŽITÉ - DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A PONECHAJTE JE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Babydoppler Connect môžete pripojiť k voľnej aplikácii Babydoppler Connect, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play a je určená na počúvanie a zaznamenávanie rytmu srdcového tepu dieťaťa a jeho zdieľanie s Vašími najbližšími.

AUTORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÁ ZNAČKA
Cocoon Life je registrovaná obchodná značka spoločnosti L.A.T.L. SAS, fungujúcej pod názvom LATL TECHNOLOGIE. Tento návod je chránený medzinárodnými autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia, preklad alebo prenos akéhokoľvek prostriedku tohto dokumentu alebo jeho časti je zakázané.
Apple Store je registrovaná ochranná známka spoločnosti APPLE Inc.
Google Play je registrovaná ochranná známka spoločnosti GOOGLE Inc

- BALENIE OBSAHUJE**
- 1 Babydoppler Connect
 - 1 slúchadlá
 - 1 návod na použitie
 - 1 kábel s dvojíťm konektorom
 - 1 ultrazvukový gél 40ml

UPOZORNENIE A ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCA
Babydoppler Connect bol vyvinutý v súlade s európskou smernicou 93/42 / EEC (trieda I) a súvisiacich noriem. Babydoppler je určený pre širokú verejnosť starší ako 14 rokov za účelom zistenia srdcového tepu plodu. Nesmie byť používaný na vypracovanie lekárskej diagnózy alebo k terapii založenej na zhromaždených informáciách prostredníctvom tohto prístroja. Iba lekári sú oprávnení vydávať lekársku diagnózu. Babydoppler v žiadnom prípade nenahrádza lekársky dohľad. Ak nepočujete tlkot srdca dieťaťa, môže to byť preto, že Babydoppler nie je správne umiestnený, nie je použitý ultrazvukový gél, káble nie sú správne zapojené alebo sú nefunkčné batérie. **V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE SVOJHO LEKÁRA.** BabyDoppler je dodávaný s káblom špeciálne vyvinutým pre počúvanie srdiečka vášho dieťaťa na smartphonu či tabletu. **POUŽITIE INÉHO KÁBLA AKO TOHO, ktorý bol dodaný SPOLU S TÝMTO VÝROBKOM, môže poškodiť váš smartphone alebo tabliet. POUŽÍVAJTE IBA kábel, ktorý bol dodaný s výrobkom BABYDOPPLER CONNECT.**
Mali by ste tiež opatrne manipulovať s Babydoppler Connect a jeho káblom. Neotáčajte alebo neničte kábel a nepokúšajte sa sami demontovať alebo opraviť Babydoppler alebo kábel. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY sa zriekajú niešť zodpovednosť v prípade poškodenia Babydoppleru, smartphonu alebo tabletu vzniknutého s použitím iného kábla, než toho, ktorý je dodávaný spolu so zariadením Babydoppler.
BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY sa zriekajú niešť akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia, zlej údržby alebo zmeny alebo opravy Babydoppleru a káblov osobami, ktoré nie sú na tento účel oprávnené spoločnosť BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY.

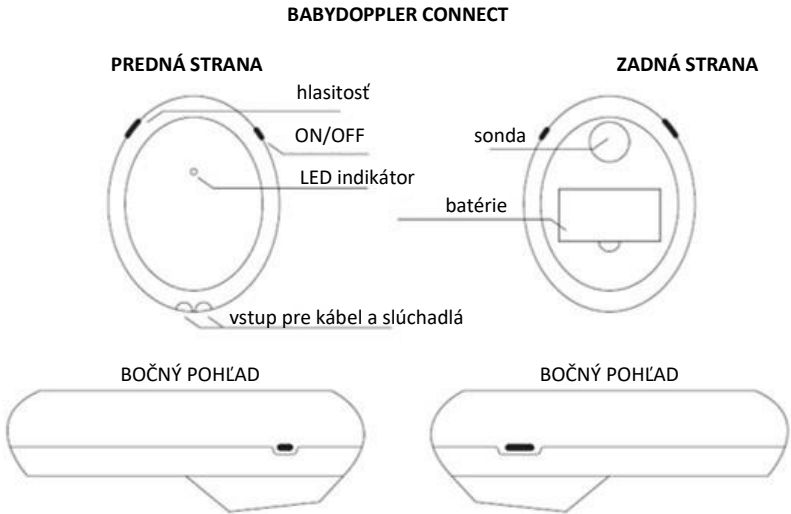

- BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE**
Užívateľ môže používať a udržiavať Babydoppler a jeho príslušenstvo podľa tohto návodu. Babydoppler Connect je napájaný 2x 1,5 V batériami typu AAA (nie sú súčasťou). **Aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu, používajte Babydoppler Connect podľa nasledujúcich bezpečnostných pravidiel:**
1. Neotvárajte kryt na batérie keď je prístroj zapnutý.
 2. Prístroj sami neotvárajte ani ho nedemontujte.
 3. Dodržujte správnu polaritu batérií (vkladajte ich v správnom smere).
 4. Ak Babydoppler dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie a uchovávajte ich na suchom a tmavom mieste.
 5. Prístroj Babydoppler aj príslušenstvo udržiujte v suchu. Vlhkosť a tekutiny môžu elektroniku poškodiť.
 6. Prístroj Babydoppler aj jeho príslušenstva neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu. Prach alebo mikročastice môžu spôsobiť poruchy.
 7. Prístroj Babydoppler aj jeho príslušenstvo nedávajte do blízkosti zdrojov tepla. Mohlo by dôjsť k vytečeniu batérií.
 8. Prístroj Baby doppler nie je vhodný pre použitie v prítomnosti horľavých kvapalín a plynu.
 9. Batérie nehádzte do ohňa, môže dôjsť k výbuchu.
 10. Elektromagnetické rušenie - prístroj Babydoppler nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu alebo akéhokoľvek rádiového vysielateľa; mohlo by to spôsobiť elektromagnetické rušenie.
 11. Toto zariadenie nie je možné použiť s defibrilátorom ani s žiadnym vysokofrekvenčným lekársym zariadením.
 12. Vyvarujte sa nárazom na zariadenia či jeho spadnutie.
 13. Používajte Babydoppler a jeho príslušenstvo len na účely, na ktoré je určený.
 14. Nedovoľte deťom, aby používali toto zariadenie a jeho príslušenstvo.
 15. Babydoppler by mal byť aplikovaný len na zdravú pokožku. Ak si nie ste istí fyziologickým stavom pokožky, prístroj nepoužívajte.
 16. Odporúčaný gél je hypoalergénny prípravok, nedráždivý a nekorozívne. Ak máte po použití gélu akúkoľvek negatívnu reakciu, zastavte aplikáciu a použitie konzultujte s lekárom.
 17. Babydoppler by mal byť po každom použití vyčistený podľa odporúčania - vid' ďalej.
 18. Babydoppler by sa nemal používať pred 12. týždňom tehotenstva.
 19. Babydoppler a jeho príslušenstvo by mali byť recyklované na konci svojho životného cyklu v súlade s platnými ustanoveniami.
 20. Dávajte pozor na uškrtenia v dôsledku káblov, najmä v dôsledku nadmernej dĺžky.

Ochranná známka + Obchodné referencie	Babydoppler Connect
Bezpečnostné triedy	typu CF IEC 60601-1:2005 + A1:2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 60601-1-2 trieda B skupina 1
Napájanie	2x 1,5V batéria AAA, spotreba energie <1 W
Vhodné používanie	od 12. týždňa tehotenstva
Vhodné prostredí	Počas používania: - teplota: od + 5°C do 40°C - vlhkosť: max. 80% - atmosférický tlak: od 70 kPa do 106 kPa Počas prepravy a skladovania: - teplota: od -10°C do 55°C - vlhkosť: max. 93% - atmosférický tlak: od 50 kPa do 106 kPa
Fyzikálne vlastnosti	Rozmery: 105 x 90 x 36 mm Hmotnosť: cca 80g (vrátane batérií)
Sonda	Nominálna frekvencia: 3 MHz Prevádzková frekvencia: 3 MHz ± 10% Výstupný akustický výkon: <1 MPa Ispta: <100 mW / cm2 MI a TI <1 Intenzita ultrazvuku: lob <20 mW / cm2 Efektívne vyžarovanie povrchu snímača <208 mm2

Babydoppler Connect je veľmi kompaktný, prenosné elektronické zariadenie s nízkou spotrebou, určené pre počúvanie rytmu srdcového tepu dieťaťa u tehotných žien a ich rodín. Hoci je v súlade s európskou smernicou 93/42 / EHS (trieda I) a súvisiacich štandardov, nie je určené pre lekárske diagnostické účely a používa sa v spojení s mobilnou aplikáciou Babydoppler Connect a špeciálnym káblom dodaným na tento účel. Prístroj Babydoppler Connect má vysoko citlivú sondu 3 MHz a jeden zvukový výstup pre pripojenie ku smartphone / tabletu, za pomocou kábla špeciálne navrhnutého firmou BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY a dodávané spolu so zariadením Babydoppler Connect.

POUŽÍVANIE INÉHO KÁBLA MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE POŠKODENIE A STRATU SMARTPHONE ALEBO TABLIET. POUŽÍVAJTE IBA DODÁVANÝ KÁBEL.


Intenzita ultrazvuku vyžarovaného Babydoppler Connect je oveľa slabší ako stanovujú platné predpisy.

SYMBOLY


Logo / znak	Význam
	Označenie CE
	Katalógové číslo
	Sériové číslo
	Pozrite sa na dokumentáciu
	Typ CF: používaná časť
	Nevyhadzujte do zmiešaného odpadu: zlikvidujte spolu s elektrickým a elektronickým zariadením
	Vstup pre smartphone
	Vstup pre slúchadlá
	Tlačidlo ON/OFF
	Nastavenie hlasitosti
	Dátum výroby
	Adresa výrobcu
	Ochranná známka

POUŽITIE

- Nainštalujte aplikáciu Babydoppler Connect na tablet alebo smartphone z App Store alebo Google Play platformy (kľúčové slovo «Babydoppler Connect»).
- Než prístroj prvýkrát použijete, vložte 2 batérie 1,5 typu AAA (dbajte na správnu polaritu).
- Pripojte dodané slúchadlá do USB zbernice konektora (1).
- Zapnite Babydoppler Connect stlačením tlačidla ON/OFF na pravej strane zariadenia po dobu 2 sekúnd. LED kontrolka by sa mala rozsvietiť. Ak tomu tak nie je, skontrolujte polaritu batérií. Pri slabom stave batérie bude svetlo blikáť.
- Aplikujte ultrazvukový gél (2) a umiestnite sondu na matkino brucho. Približnú polohu určíte podľa týždňa tehotenstva - pozri. schéma (3). Sondu mierne upravívajte, kým nebudete počuť tlkot srdca dieťaťa.
- Nastavte hlasitosť slúchadiel (4 úroveň) vďaka tlačidlu na ľavej strane zariadenia. Krátkym stlačením tlačidla dôjde k zmene hlasitosti o 1 úroveň. Dlhým stlačením zmeníte hlasitosť rýchlejšie.
- Spustíte aplikáciu Babydoppler Connect a zaregistrujte sa.
- Ak chcete zariadenie Babydoppler Connect používať s aplikáciou, zapojte dodaný kábel do vhodnej zásuvky na zariadení (4) a druhý koniec pripojte do konektora vášho tabletu / smartphonu. Do druhej zdiery zapojte dodané slúchadlá (4). Nakoniec v aplikácii stlačte tlačidlo «Record your baby». Pre lepšie počúvanie doporučujeme aktivovať režim «Airplane Mode».

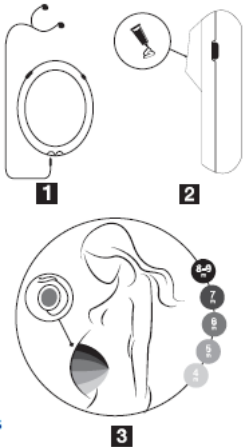

9. Stlačte funkciu «Register», pre uloženie histórie počúvaní.
10. Ak chcete srdcový tep svojho bábätka zdieľať s niekým iným, použite funkciu «Your recordings». Kliknite na prehranie, ktoré chcete zdieľať, a potom kliknite na funkciu zdieľania «Share». Zvoľte vysielací kanál (mail, MMS, sociálna sieť). Z tohto rozhrania ste tiež schopní počúvať nahrávku stlačením funkcie "Listen".

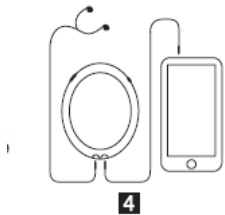

ÚDRŽBA

Pred čistením zariadenia vždy vypnite a vyberte batérie. Pomocou mäkkej, suchej handričky očistite povrch zariadenia a utrite sondu, aby ste odstránili akékoľvek stopy ultrazvukového gélu. Ak je to potrebné, vyčistite mäkkou handričkou namočenou v mydlovej vode a okamžite vysušte čistou látkou. Na čistenie nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako je acetón alebo akékoľvek iné abrazívne prostriedky. Nedovoľte, aby kvapalina prenikla dovnútra prístroja, neponárajte žiadnu časť zariadenia do akejkoľvek kvapaliny. Pre dezinfekciu a sterilizáciu povrchu sondy použite čistý 70% alkohol a nechajte vyschnúť alebo vytrite mäkkou, suchou handričkou.

Zariadenie Babydoppler Connect je veľmi krehké a malo by sa s ním zaobchádzať opatrne. Gél musí byť odstránený po každom použití Babydoppleru. Tieto bezpečnostné opatrenia predlži životnosť Babydoppleru. Užívateľ musí tiež pred manipuláciou zabezpečiť, aby Babydoppler neobsahoval žiadne zjavné poškodenie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho bezpečnosť a správne fungovanie. Štandardná doba prevádzky batérií je cca až 20 dní. Životnosť tohto zariadenia je cca 10 rokov. Než začnete toto zariadením používať, počkajte cca 10 minút, aby dosiahlo okolitej teploty. Odporúča sa kontrolovať správnu funkciu prístroja v mesačných intervaloch. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, naďalej prístroj nepoužívajte, odporúčame prístroj nahradiť iným. Vykonávajte pravidelné bezpečnostnou testy, aby sa uistili, že je zariadenie izolované proti elektrickému prúdu. Odporúčaná frekvencia je raz za dva roky alebo podľa smerníc krajiny, v ktorej sa zariadenie používa. Zariadenia a príslušenstvo musia byť likvidované podľa miestnych predpisov. Môžu byť vrátené predajcovi alebo výrobcovi na recykláciu alebo zlikvidované oddelene. Babydoppler Connect a jeho mobilné aplikácie neposkytujú presné údaje o srdcovom rytme plodu, poskytujú iba záznam zvuku. Ak nie je srdcový rytmus dôveryhodný, existujú ďalšie metódy kontroly (napr. Stetoskop). **Tento druh vyšetrenia je oprávnený vykonávať len lekár.**

MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade ťažkostí Babydoppler vypnite, vyberte batérie a odpojte dodané káble. Zapojte káble späť do smartphonu alebo tabletu a do svojho Babydoppler, znovu nainštalujte batérie a znovu prístroj zapnite. Ak sa pri použití Babydoppleru objavia nasledujúce problémy, skúste ich vyriešiť pomocou nasledujúcich pokynov.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zvuk je slabý	- Hlasitosť je príliš nízka. - Batéria je príliš slabá. - Nepoužili ste ultrazvukový gél.	- Upravte hlasitosť. - Vymeňte batérie. - Na sondu aplikujte gél.
Príliš veľký hluk	- Hlasitosť je príliš vysoká. - Napájanie je nízke. - Rušenie z externého signálu.	- Upravte hlasitosť. - Vymeňte batérie. - Uistite sa, že váš smartphone alebo tablet je v režime «Airplane Mode».
Príliš nízka citlivosť	- Sonda nie je správne umiestnená. - neaplikovali ste ultrazvukový gél.	- Zmeňte umiestnenie sondy. - Na sondu aplikujte gél.
Tlkot srdca nie je počuť alebo sa nedá nahráť	- Sonda nie je správne umiestnená. - neaplikovali ste ultrazvukový gél. - Káble nie sú správne zapojené.	- Zmeňte umiestnenie sondy. - Na sondu aplikujte gél. - Káble zapojte správne.

ZÁRUKA

Aplikácia Babydoppler Connect bola vyvinutá pre novú generáciu smartfónov a tabletov a novej verzie operačných systémov iOS / Android. BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY nemôže zaručiť vynikajúce fungovanie aplikácie Babydoppler Connect pre všetky smartphone / tablety dostupné na trhu a predchádzajúce verzie operačných systémov iOS / Android. V každom prípade môže byť Babydoppler Connect používať samostatne (bez pripojenia k smartfónu / tabletu) spolu s dodanými slúchadlami.