


innoGIO

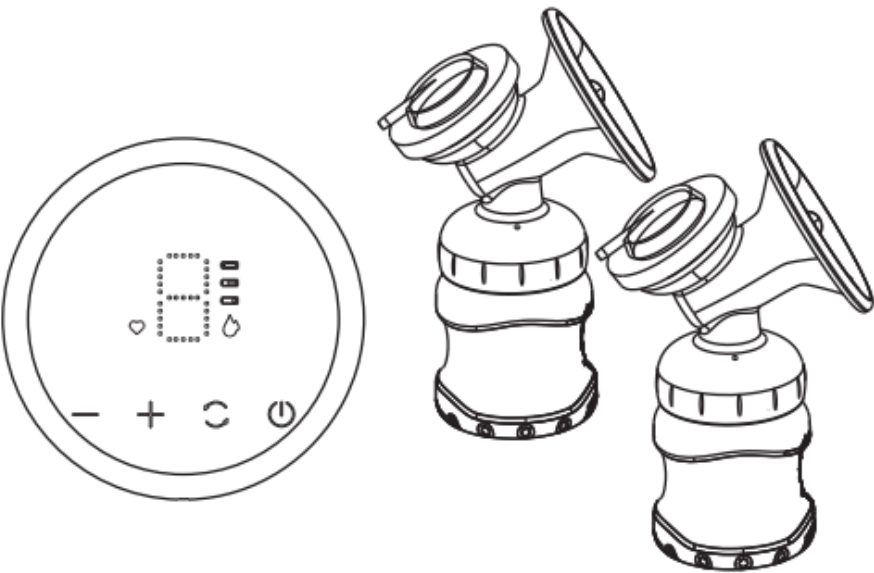

GIOlatte

Dvojitá elektrická odsávačka mlieka

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt InnoGIO.

Návod na použitie

Pozorne si prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
Obrázky slúžia len na ilustračné účely.

FUNKCIE

Elektrická odsávačka mlieka InnoGIO ponúka **2 režimy**: stimulačný režim a režim odsávania, ktorý napodobňuje sanie dieťaťa.



pohodlné odsávanie mlieka



nabíjanie cez kábel USB



jemné odsávanie, možnosť nastavenia režimu odsávania



vydrží 1,5h na jedno nabitie




jednoduché používanie

POPIS DIELOV

Pred použitím skontrolujte súčasti výrobku.
Ak niektoré diely chýbajú, obráťte sa na predajcu.

Poznámka: Obrázky slúžia len na porovnanie.

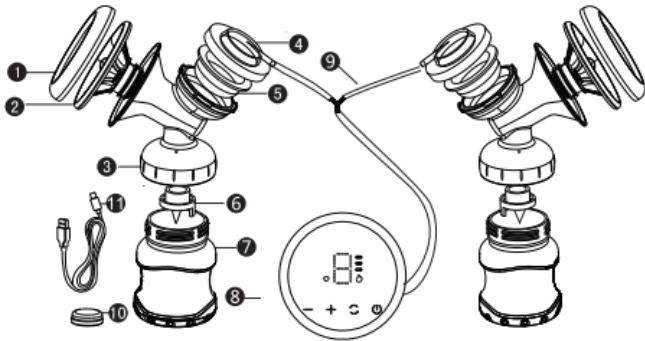

číslo	časť	materiál	tepelná odolnosť	počet kusov
1	ochranný kryt	polypropylén	-20-120°C	2
2	masážny kôš na prsia	silikón	-20-200°C	4
3	odsávacie hlavice	polypropylén	-20-120°C	2
4	čiapka na hlavicu	polypropylén	-20-120°C	2
5	membrána	silikón	-20-200°C	2
6	ventil	silikón	-20-200°C	4
7	fľaša	polypropylén	-20-120°C	2
8	hlavná jednotka	ABS	-20-80°C	1
9	vzduchová hadica	silikón	-20-200°C	1
10	uzáver fľaše	polypropylén	-20-120°C	2
11	kábel USB			1

SESTAVENIE ODSÁVAČKY

(Poznámka: Obrázky sú len ilustračné, pozrite si skutočný výrobok).

Vložte masážny košík (2) do hlavice odsávačky mlieka (3). Uistite sa, že košík je úplne nasadený cez okraj hlavice, aby sa zaistilo jeho pevné prilnutie.

Poznámka: 2 veľkosti prsných košíčkov sú súčasťou balenia.

Najprv vložte membránu (5) do nasávacej hlavy (3). Uistite sa, že je membrána správne a rovnomerne nasadená. Potom na membránu nasadte uzáver (4). Ako je znázornené na obrázku.

Ventil (6) zasunúť do spodnej časti nasávacej hlavy (3), ako je znázornené na obrázku. Poznámka: Ventil držte opatrne, aby ste ho nepoškodili.


Ak je ventil poškodený, nepoužívajte ho. Vymeňte ho za nový.

Poznámka: 2 náhradné ventily sú súčasťou dodávky.

Naskrutkujte fľašu na mlieko so širokým hrdlom (7) do spodnej časti hlavy čerpadla (3) a nakoniec pripojte vzduchovú hadicu (9) k hlavnej jednotke (8), ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že je hadica pevne nasadená, aby nedochádzalo k úniku vzduchu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Hlavná jednotka má celkom 4 tlačidlá: **1** - tlačidlo zapnutia/vypnutia, **2** - tlačidlo prepínania režimov (stimulácia/odsávanie), **3** - tlačidlo zvýšenia podtlaku, **4** - tlačidlo zníženia podtlaku.

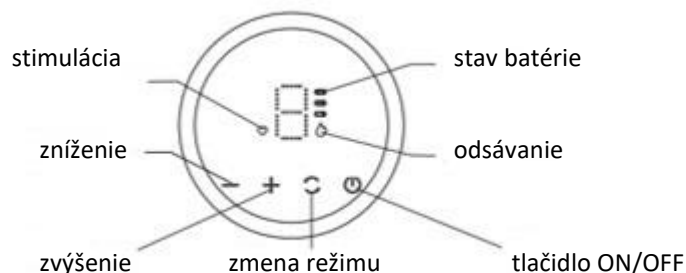

2. Pred použitím si umyte ruky a skontrolujte, či sú všetky časti odsávačky dôkladne vyčistené a správne zostavené.

3. Posadte sa do pohodlnej polohy a natiahnite si nohy. Pre lepší účinok odporúčame pred odsávaním pripraviť teplý uterák na horúci obklad alebo masáž prsníkov.

4. Masážny košík priložte na bradavku a druhou rukou ho pevne držte pri prsníku, aby ste zabránili prístupu vzduchu.

5. Stlačením tlačidla ON/OFF na hlavnej jednotke automaticky vstúpite do režimu stimulácie. Rozsvieti sa kontrolka . Stimulácia sa vykonáva preto, aby bolo používanie odsávačky účinnejšie a pohodlnejšie. Odsávanie v stimulačnej fáze je nízke, jeho účelom je masáž a stimulácia prsníkov. Stláčaním tlačidiel "+" a "-" vyberte príslušnú úroveň stimulácie. Režim stimulácie má celkovo 5 úrovní.

6. Stlačením tlačidla prepnete na režim odsávania. Rozsvieti sa kontrolka . Prístroj prejde do normálneho režimu odsávania prsníkov. V tomto režime je k dispozícii 9 úrovní sacieho výkonu. Počas používania stláčaním tlačidiel "+" a "-" vyberte požadovanú silu odsávania.

- Ako zistiť, aký najvyšší sací výkon je pre vás najvhodnejší?

Postupne zvyšujte úroveň odsávania. Keď sa začnete cítiť mierne neprijemne, zastavte a potom mierne znížte úroveň odsávania.

- Funkciu "odsávanie" odporúčame používať hneď po režime "stimulácia".
- Odsávačka mlieka sa automaticky vypne po 30 minútach.

UPOZORNENIE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Nikdy nevkladajte odsávačku mlieka do vody alebo sterilizátora, aby ste ju umyli alebo vydezinfikovali.
- Spojovacia hadica sa môže používať bez dezinfekcie. Dávajte pozor, aby ste počas používania hadičku nekrútili alebo nestlačili.
- Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte výrobok mimo dosahu dojčiat a detí.
- Obal nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu dojčiat a detí.
- Nepoužívajte výrobok v posteli, postieľke, kolíske, hracích centrách. Výrobok nie je hračka.
- Ak používate tento výrobok v období zníženej laktácie alebo porúch laktácie, riadte sa odporúčaniami lekárov alebo zdravotných sestier či pôrodných asistentiek. Používanie tohto výrobku by sa malo pozastaviť, kým sa nezíska takéto odporúčanie. Tento výrobok nemá štatút zdravotníckej pomôcky a nie je na tento účel určený. Preto by sa výrobok nemal používať na lekárske účely, najmä na liečbu alebo zmiernenie ochorenia alebo na nahradenie fyziologického alebo chorobného procesu alebo stavu.
- Hlavnú jednotku tohto výrobku sami nerozoberajte, a to ani v prípade, že je poškodená. Kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora a požiadať ho o opravu.
- Tento výrobok je určený len na používanie jedným používateľom a nemal by sa zdieľať medzi používateľmi. Zo zdravotných a hygienických dôvodov ho nepoužívajte spoločne s viacerými osobami.

UPOZORNENIE

- Odstráňte všetky doplnky, ktoré prichádzajú do kontaktu s prsníkmi alebo materským mliekom, ako sú fľaše, cumlíky, cumlíky, prsné nástavce.
- Uvedené príslušenstvo po použití ihneď umyte, aby ste zabránili zaschnutiu zvyškov mlieka a baktérií. Po umytí ich skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.
- Pri montáži dbajte na to, aby boli komponenty zostavené v správnom poradí.

MOŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

- **Problém:** Zariadenie nefunguje
Riešenie: Skontrolujte napájanie, či je adaptér správne vložený. Vymeňte napájací kábel.
- **Problém:** Nedostatočné odsávanie
Riešenie:
 1. Skontrolujte, či je ventil správne nainštalovaný. Ak bola inštalácia správna a sanie je naďalej nedostatočné, vložte ventil na 3 minúty do vriacej vody a po vysušení ho znovu nainštalujte; správne sanie by sa malo obnoviť.
 2. Napájanie z batérie je nedostatočné. Na nabíjanie zariadenia použite kábel USB.
 3. Skontrolujte, či je prsný košíček dobre pripevnený k prsníku a či nedochádza k úniku vzduchu.
 4. Ak je teplota v miestnosti nižšia ako 15°C, nechajte najskôr odsávačku 30 sekúnd v prevádzke.

LIKVIDÁCIA

Likvidácia nepotrebných zariadení domácimi používateľmi v EÚ:



Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok nemožno likvidovať rovnakým spôsobom ako bežný domový odpad. V dôsledku toho ste zodpovední za správnu likvidáciu zariadenia a ste povinní odovzdať ho na autorizovanom zbernom mieste na recykláciu nepotrebných elektronických a elektrických zariadení. Triedenie, likvidácia a recyklácia použitých zariadení pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recyklácia vykonávala

spôsobom šetrným k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Ďalšie informácie o zberných miestach pre použité zariadenia získate od miestnej služby pre likvidáciu odpadu z domácností alebo od miestneho úradu.

Napájanie: DC 5V 2A

Kapacita batérie: 1500 mAh

innoGIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk