



Rinö Pro

Nosný aspirátor bez filtra

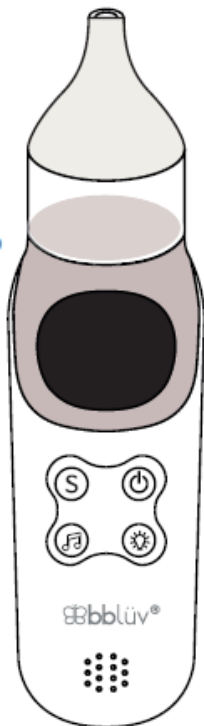

Pred použitím si pozorne
prečítajte návod.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

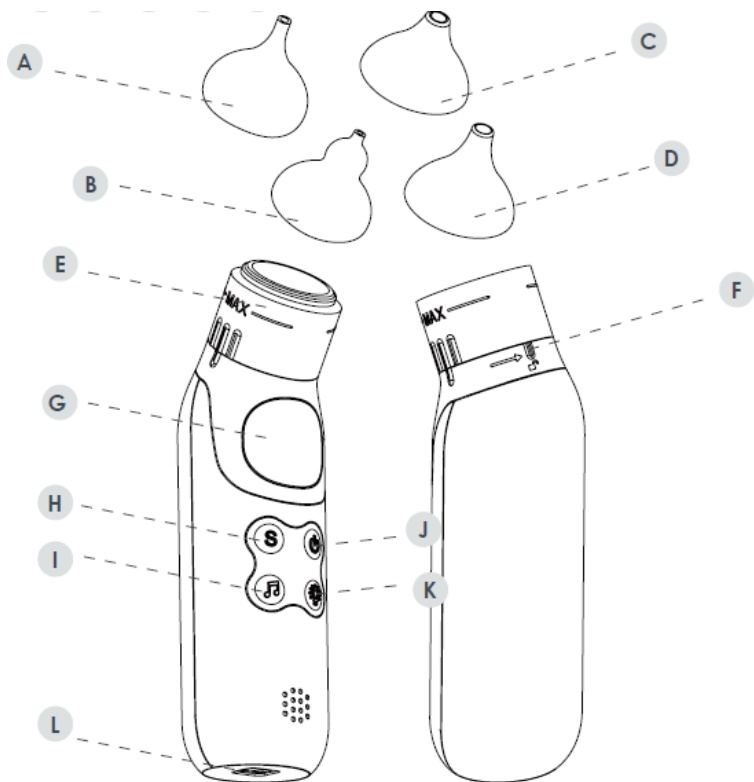

- A Predĺžená špička pre deti vo veku od 2 rokov
- B Kónická špička pre deti vo veku 0–2 roky
- C Široká špička pre deti vo veku 0–2 roky
- D Široká špička pre deti vo veku od 2 rokov
- E Nádoba na hlien
- F Zamknutie/odmoknutie nádrže
- G LED displej
- H Regulátor úrovne odsávania
- I Tlačidlo hudby
- J Tlačidlo štart/stop
- K Tlačidlo osvetlenia
- L Nabíjací port typu C


PLATNÉ NORMY:

Na konštrukciu a výrobu zariadenia sa vzťahujú nasledujúce normy:

- IEC/EN 60601-1 Elektrické zdravotnícke zariadenia – Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základné vlastnosti
- IEC/EN 60601-1-2 Zdravotnícke elektrické zariadenia – Časť 1-2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základný výkon – Doplnková norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky a skúšky
- IEC/EN 60601-1-6 Elektrické zdravotnícke zariadenia – Časť 1-6: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť – Doplnková norma: Použiteľnosť
- IEC/EN 60601-1-11 Elektrické zdravotnícke zariadenia – Časť 1-11: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základný výkon – Doplnková norma: Požiadavky na elektrické zdravotnícke zariadenia a elektrické zdravotnícke systémy používané v domácom zdravotníckom prostredí
- EN ISO 10993-5 Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 5: Testy cytotoxicity in vitro
- EN ISO 10993-10 Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 10: Testy senzibilizácie kože
- EN ISO 10993-23 Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 23: Testy dráždivosti


PRED POUŽITÍM

1. Nabite batériu Rinö Pro počas dvoch hodín. Po dokončení nabíjania sa na displeji batérie zobrazia všetky tri pruhy.

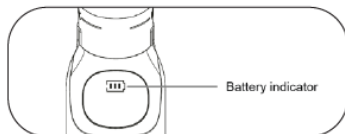


Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov nie je možné používať Rinö Pro počas nabíjania. Aby nedošlo k poškodeniu batérie v dôsledku dlhodobého nízkeho napätia, nabíjajte zariadenie každé tri mesiace.

2. Rozmontujte nádobku na hlien a nosné koncovky, vyčistite a vysušte ich časti.

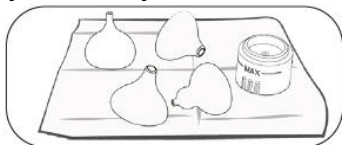


3. Pripevnite nádobku na hlien. Na montáž používajte iba čisté a suché diely. Pripevnite silikónovú špičku. Vyberte veľkosť, ktorá najlepšie vyhovuje nosu vášho dieťaťa.

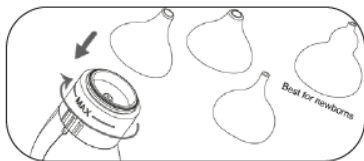

AKO POUŽÍVAŤ RINÖ

1. Stlačte tlačidlo Start/Stop na 2 sekundy, aby ste zapli Rinö Pro.
2. Stlačte tlačidlo nastavenia sania a vyberte vhodnú silu sania.

TIP: Ak je hlien riedky, môžete použiť Rinö Pro na nižšom nastavení.

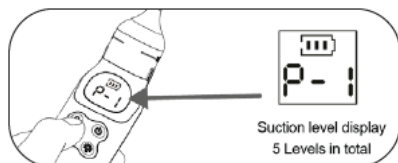


Ak je hlien hustý, môžete použiť Rinö Pro na vyššom nastavení ako zvyčajne.

POZNÁMKA: V prípade opuchnutej nosnej sliznice alebo upchatých nosných dierok použite 30 minút pred aplikáciou dekongestívne roztoky alebo nosné spreje.


3. Posadte dieťa na kolená, držte ho v náručí alebo posadte do vzpriamenej polohy a podoprite mu chrbát vankúšom. Môžete ho tiež umiestniť do detskej hojdačky alebo detskej sedačky. Aby ste predišli poraneniu, nevkladajte špičku príliš hlboko, netlačte na stenu nosnej dierky a nezatvárajte nosnú dierku úplne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by špička mala smerovať von z nosnej dierky v uhle 90 stupňov.



4. Stlačte tlačidlo Start/Stop, aby ste pozastavili prevádzku. Stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop po dobu 2 sekúnd, aby ste vyplí zariadenie Rinö Pro. Zariadenie Rinö Pro sa automaticky vypne po 5 minútach, ak nedôjde k žiadnej interakcii používateľa.

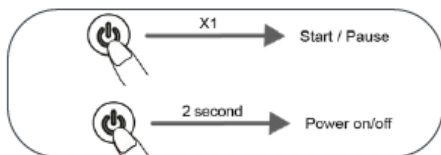

5. Sledujte, ako sa nádoba na hlien plní nečistotami. Neprekračujte maximálnu hladinu v nádobe na hlien.

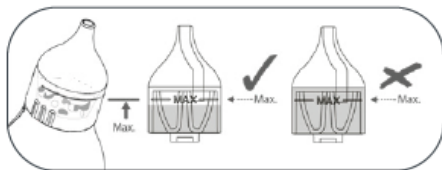

Poznámka: Nechajte nosové sekréty prekročiť značku MAX na nádobe na hlien.

Ak chcete dieťa rozptýliť, po zapnutí napájania použite nasledujúcu funkciu.



Tlačidlo svetla

1x zapnutie/vypnutie svetla

Tlačidlo hudby

1x zapnutie hudby

Stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste zmenili hudbu.

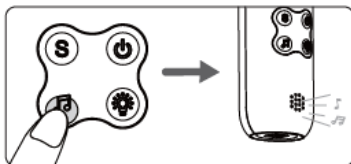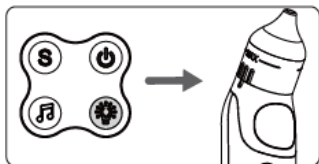

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Z hygienických dôvodov je dôležité umývať Rinö Pro pred a po každom použití. Dodržiavajte pokyny.

1. Otočením uzamknite/odomyknite nádobu na hlien.
2. Jemne stiahnite špičku.

3. Vypláchnite/umyte nádobku na hlien a špičky.

Teplota vody nesmie prekročiť 100 °C alebo teplotu pary.

4. Motorovú jednotku očistite vlhkou handričkou a osušte čistou suchou utierkou. Dbajte na to, aby sa do nosného aspirátora nedostala žiadna tekutina.

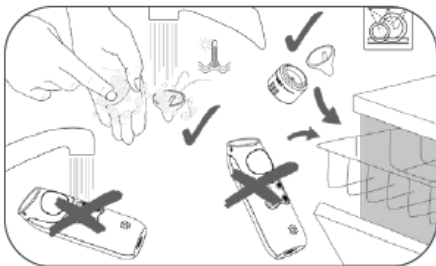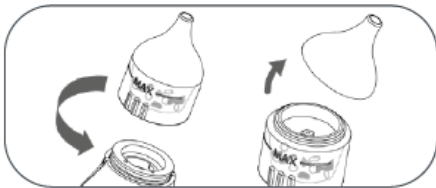

URČENÉ POUŽITIE

Rinö poskytuje prerušované odsávanie na odstránenie nosových sekrétov a hlienu, čím zmierňuje nepríjemné pocity v nose.

UPOZORNENIE

- Zariadenie Rinö Pro by malo vždy používať dospelá osoba.
- Zariadenie Rinö Pro je určené výlučne na čistenie/odsávanie nosových sekrétov. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke, napríklad v ústach alebo ušiach.
- V prípade infekcie, horúčky, podráždenia nosa alebo krvácania okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojim lekárom.

- Nepoužívajte Rinö Pro, ak má vaše dieťa na nose známky poranenia, rezné rany, podráždenie alebo zápal.
- Kontraindikácie: hemofília, rozšírené krvné cievy v nosovej priehradke, časté krvácanie z nosa, liečba antikoagulanciami, vrodené chyby (napr. rozštep podnebia).
- Rinö Pro je určený na osobné, nie komerčné použitie.
- Rinö Pro obsahuje elektrické komponenty, ktoré je potrebné chrániť počas čistenia.

Postupujte podľa pokynov na čistenie v časti Čistenie a údržba tejto príručky.

- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 12 rokov.
- Nevystavujte Rinö Pro priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte iné trysky ako tie, ktoré sú dodávané s týmto zariadením.
- Neupravujte Rinö Pro bez súhlasu výrobcu.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k elektrickej zásuvke na inom okruhu, ako je prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

Technické špecifikácie

Displej: LED obrazovka

Sací výkon: -55 až -75 kPa

Hmotnosť: 150 g (s príslušenstvom) (5,3 oz)

Rozmery: 168 × 47 × 54 mm (6,6 × 1,85 × 2 palce)

Stupeň odolnosti proti vode: IP22

Zdroj napájania: 3,7 V 450 mAh Li-ion batéria

Zdroj nabíjania: vstup DC 5 V/1 A

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom: typ BF

Prevádzkový režim: Nepretržitá prevádzka

Predpokladaná životnosť zariadenia (elektrické časti): 3 roky

Životnosť batérie: 50 minút

Prevádzkové podmienky

Teplota: +10 °C až +40 °C

Vlhkosť: 15 % až 95 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie

Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa

Podmienky skladovania a prepravy

Teplota: -20 °C až +55 °C

Vlhkosť: ≤95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca

Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa